
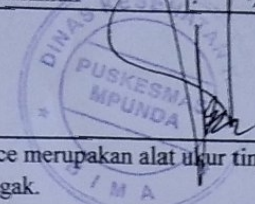
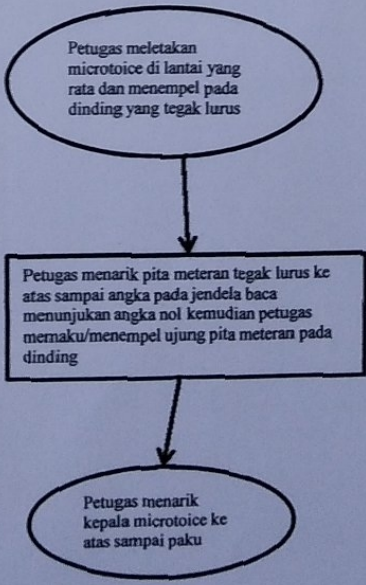
	PEMASANGAN MICROTOICE		Terkendali	
	SOP	No.Dokumen	: SOP/UKM/GI21 / 051	
		No.Revisi	: 001	
		Tanggal Terbit	: 29-2-2017	
Halaman		: 1/2		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, Amd.Keb</u> NIP.196612311986032087	
1. Pengertian	Microtoice merupakan alat ukur tinggi badan yang digunakan untuk seseorang yang dapat berdiri tegak.			
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam pemasangan microtoice			
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No. 448/26.17.12016.tahun.2016.tentang.pemasangan.microtoice			
4. Referensi	Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita, Depkes RI, 2006			
5. Prosedur/Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Alat dan bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Microtoice b. Paku c. Palu 2. Petugas yang melaksanakan <ol style="list-style-type: none"> a. Gizi b. Perawat c. Bidan 3. Langkah-Langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas meletakkan microtoice di lantai yang rata dan menempel pada dinding yang tegak lurus b. Petugas menarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka nol kemudian petugas memaku/menempel ujung pita meteran pada dinding c. Petugas menarik kepala microtoice ke atas sampai paku 			
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Petugas meletakkan microtoice di lantai yang rata dan menempel pada dinding yang tegak lurus]) --> B[Petugas menarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka nol kemudian petugas memaku/menempel ujung pita meteran pada dinding] B --> C([Petugas menarik kepala microtoice ke atas sampai paku]) </pre>			
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. posisi pemasangan alat			
8. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gizi 2. Poli Umum 3. KIA 			

9. Dokumen terkait

10. Kekam historis perubahan

No	Yang di ubah	Isi perubahan	tanggal mulai diberlakwkan