


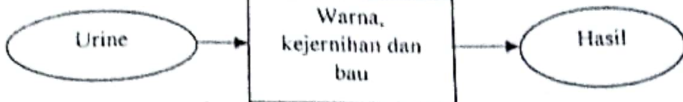

6. Bagan Alir	 <pre> graph LR A([Urine]) --> B[Warna, kejernihan dan bau] B --> C([Hasil]) </pre>			
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Volume urine harus cukup			
8. Unit Terkait				
9. Dokumen terkait				
10. Rekaman historis perubahan	No.	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan

	<p style="text-align: center;">PEMERIKSAAN NARKOBA</p> <p>No Dokumen : SOP/UKP/LAB/20 No Revisi : 00 Tanggal Terbit : 28 Januari 2019 Halaman : 1/2</p>	
<p>UPT PUSKESMAS MPUNDA</p> <p>1. Pengertian</p>	<p style="text-align: center;"><i>Terkendali</i></p> <p>Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.</p>	<p>Nuralidiah, Amd. Keb Nip.196612311986032087</p>
<p>2. Tujuan</p>	<p>Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengetahui ada tidaknya zat adiktif yang terdapat dalam tubuh seseorang</p>	
<p>3. Kebijakan</p>	<p>Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Mpunda Nomor : 440/025.b/VI/2019</p>	
<p>4. Referensi</p>	<p>Tentang : Pelayanan Laboratorium</p>	
<p>5. Prosedur/ Langkah-langkah</p>	<p>Panduan Test Urine Narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Alat dan Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pot Urine b. Pipet Pastur c. Urine Sewaktu 2. Petugas yang melaksanakan: 3. Langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Buka kaset reagen pemeriksaan urine untuk narkoba, letakkan pada permukaan yang rata. b. Urine dipipet sampai tanda batas pipet, lalu teteskan urine tersebut kedalam sumur sampel, hindari gelembung udara. c. Hasil dibaca dalam waktu 4-7 menit. d. Hasil tidak boleh dibaca setelah lewat dari 7 menit untuk menghindari kesalahan pembacaan atau hasil invalid. e. Interpretasi Hasil <ul style="list-style-type: none"> (-) Bila terdapat 2 garis merah di "C" dan "T" (+) Bila terdapat 1 garis merah di "C" <p>Invalid bila tidak ada garis di "C" dan "T"</p>	