
	<b>STERILISASI PERALATAN</b>		
	<b>SOP</b>	No.Dokumen : SOP/UKP/T/22	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 28/01/2019	
Halaman : 1/3			
<b>UPT PUSKESMAS MPUNDA</b>			<b><u>Nurahdiah, A.Md.Keb</u> Nip.196612311986032087</b>
1. Pengertian	Sterilisasi alat yaitu upaya pembunuhan atau penghancuran semua bentuk kehidupan mikroba yang dilakukan melalui proses fisik maupun kimiawi		
2. Tujuan	Sebagai pedoman petugas dalam pelaksanaan sterilisasi harus mengikuti langkah-langkah yang tertuang dalam standar prosedur kerja.		
3. Kebijakan	Surat Keterangan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor : 440/035.b/I/2019 Tentang : Pelayanan Ruang Tindakan Lingkup Upt. Puskesmas Mpunda.		
4. Referensi	Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<p>Alat dan Bahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detergen</li> <li>2. Sikat halus</li> <li>3. Sarung tangan rumah tangga</li> <li>4. Lap kering</li> <li>5. Larutan desinfektan</li> <li>6. Panci/dandang</li> <li>7. Kompor</li> <li>8. Air bersih</li> <li>9. Jam / Timer</li> </ol> <p>Langkah-langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Menyiapkan alat yang sudah dipakai direndam dengan klorin 0,5% selama 10 menit</li> <li>2. Petugas Membersihkan alat-alat tersebut dengan sabun dan disikat sampai bersih</li> <li>3. Petugas Memasukkan dalam panci dan pastikan semua permukaan alat</li> </ol>		

	<p>dalam panci perebus tertutup, terendam air dengan tinggi permukaan alat 2,5 cm diatas permukaan alat .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas Merebus alat atau benda selama 20 menit yang dihitung sejak air mendidih.</li> <li>5. Petugas Mengangkat alat ( benda yang sudah direbus dibiarkan mengering pada daerah yang bersih )</li> <li>6. Alat yang sudah di DTT siap digunakan dan disimpan dalam wadah tertentu selama 1 minggu setelah di DTT.</li> </ol>
<p>6. Bagan Alir</p>	<pre> graph TD     A([Persiapan Alat Dan Bahan]) --&gt; B[Merendam alat dengan larutan clorin 0,5%]     B --&gt; C[Mencuci dan bilas alat]     C --&gt; D[Merebus alat selama 20 menit]     D --&gt; E([Dokumentasi])   </pre>
<p>7. Hal-hal yang perlu diperhatikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal pemrosesan alat</li> <li>- Jangan melakukan DTT terhadap jarum, spuit, dan skalpel.</li> <li>- peralatan yang sudah di DTT dapat disimpan sampai dengan satu minggu</li> </ul>
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang KIA - KB</li> <li>2. Ruang Bersalin</li> <li>3. Ruang Tindakan</li> <li>4. Poli gigi</li> </ol>
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Jadwal sterilisasi peralatan</p>

10. Rekaman Histori Perubahan	No.	Yang di Ubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan
	1	Langkah-langkah dan prosedur	Penambahan kata petugas	28/01/2019