
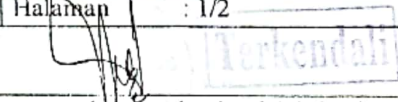
	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH		
	SOP	No. Dokumen : SOP/UKP/LA13/19	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 28 Januari 2019	
	Halaman : 1/2		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			Nurahdiah, Amd. Keb Nip:196612311986032087
1. Pengertian	Pemeriksaan golongan darah adalah kegiatan pemeriksaan golongan darah dari spesimen darah.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan golongan darah sesuai standar.		
3. Kebijakan	Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Mpunda Nomor : 440/025.b/I/2019 Tentang : Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	Modul Pelatihan Teknis Tenaga Laboratorium di Puskesmas Tahun 2015		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Alat dan Bahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu golongan darah</li> <li>b. Batang pengaduk</li> <li>c. Disposable lancet</li> <li>d. Anti A</li> <li>e. Anti B</li> <li>f. Anti AB</li> <li>g. Anti D</li> <li>h. Spesimen Darah</li> </ol> </li> <li>2. Petugas yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas laboratorium</li> </ol> </li> <li>3. Langkah – langkah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapkan reagen golongan darah, kartu golongan darah dan pengaduk.</li> <li>b. Keluarkan reagen dari kulkas dan biarkan pada suhu kamar 25-27°C selama 15-20 menit.</li> <li>c. Tulis identitas pasien pada kartu golongan darah.</li> <li>d. Teteskan pada masing-masing tempat, satu tetes darah diatas kartu golongan darah.</li> <li>e. Tambahkan masing-masing satu tetes reagen anti A, anti B, anti AB dan anti D pada kartu golongan darah yang sudah ditetesi darah.</li> <li>f. Campur hingga homogen reagen dan darah menggunakan batang pengaduk satu per satu sampai rata, jangan tercampur satu sama lain.</li> <li>g. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, reagen harus segera disimpan kembali pada suhu 2-8°C.</li> </ol> </li> </ol>		

Bagan Alir 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<pre> graph LR   A(DARA + ANTISERA) --&gt; B(CAMPUR DAN GOYANGKAN)   B --&gt; C(BACA)           </pre>			
8. Unit Terkait				
9. Dokumen terkait				
10. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan
	1.	Nama Kepala Puskesmas	Nurahdiah, AMd.Keb	23 Januari 2019
	2.	Kebijakan	Tentang Pelayanan Laboratorium	23 Januari 2019