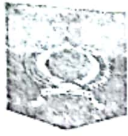

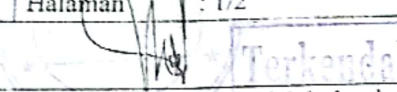
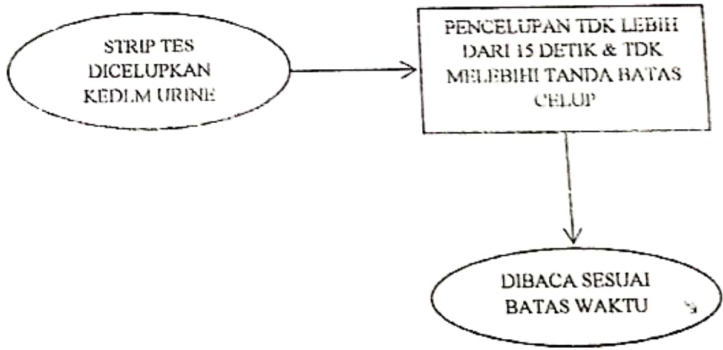


	melebihi garis batas.			
8. Unit Terkait	3. Membaca hasil melebihi batas waktu yang ditentukan.			
9. Dokumen terkait	4. Menggunakan reagen yang sudah kadaluarsa.			
10. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan
	1.	Nama Kepala Puskesmas	Nurahdiah, AMd.Keb	23 Januari 2019
	2.	Kebijakan	Tentang Pelayanan Laboratorium	23 Januari 2019

	PEMERIKSAAN TES KEHAMILAN		
	SOP	No. Dokumen : SOP/UKP/LAB/23	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 28 Januari 2019	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MPUNDA			Nurahdiah, Amd. Keb Nip:196612311986032087
1. Pengertian	Pemeriksaan tes kehamilan adalah kegiatan pemeriksaan tes kehamilan dari spesimen urine		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan tes kehamilan sesuai standar.		
3. Kebijakan	Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Mpunda Nomor : 440/025.b/1/2019 Tentang : Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	Modul Pelatihan Teknis Tenaga Laboratorium di Puskesmas Tahun 2015		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Alat dan Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Strip tes kehamilan b. Pot urine 2. Petugas yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas laboratorium 3. Langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Strip tes dicelupkan kedalam urine dengan arah panah menghadap kebawah. b. Pencelupan tidak lebih dari 15 detik dan tidak melebihi tanda batas celup. c. Strip test diangkat dari urine dan diletakkan di alas datar yang tidak menyerap. d. Hasil dibaca sesuai batas waktu dalam kit insert. 		
6. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([STRIP TES DICELUPKAN KEDALAM URINE]) --> B[PENCELUPAN TDK LEBIH DARI 15 DETIK & TDK MELEBIHI TANDA BATAS CELUP] B --> C([DIBACA SESUAI BATAS WAKTU]) </pre>		
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Faktor yang mempengaruhi hasil : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneteskan volume urine tidak sesuai. 2. Mencelupkan strip kedalam urine dengan volume sangat sedikit : 		