
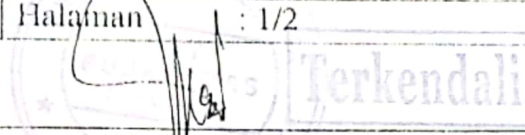

	PEMERIKSAAN HBSAG		
	SOP	No. Dokumen : SOP/UKP/LAB/12	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 28 Januari 2019	
	Halaman : 1/2		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			Nuralidiah, Amd. Keb Nip:196612311986032087
1. Pengertian	Pemeriksaan HBsAg adalah kegiatan pemeriksaan mendeteksi virus hepatitis B dari spesimen serum/plasma		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan HBsAg sesuai standar		
3. Kebijakan	Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Mpunda Nomor : 440/025.b/1/2019 Tentang : Pelayanan Laboratorium		
4. Referensi	Modul Pelatihan Teknis Tenaga Laboratorium di Puskesmas Tahun 2015		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Alat dan Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pipet b. Tabung Reaksi c. Kaset berisi reagen anti HBsAg monoklonal terkonjugasi d. Spesimen serum/plasma 2. Petugas yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas laboratorium 3. Langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika dari lemari pendingin, reagen dan sampel diletakkan dahulu pada suhu ruang 20-25°C, selama minimal 30 menit sebelum pemeriksaan. b. Keluarkan kaset reagen dari kantongnya sesaat sebelum pemeriksaan. c. Letakkan alat pada permukaan rata. d. Tambahkan 2-3 tetes serum/plasma pada lubang sampel atau sejumlah instruksi pada kit insert. e. Baca hasil dalam 15 menit atau sesuai instruksi pada kit insert. 		

6. Bagan Alir				
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel hemolisis 2. Tidak menyertakan kontrol positif dan negatif 3. Membaca hasil melebihi batas waktu yang ditentukan 4. Menggunakan reagen yang sudah kadaluarsa 5. Meneteskan volume sampel kurang 			
8. Unit Terkait				
9. Dokumen terkait				
10. Rekamman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan
	1.	Nama Kepala Puskesmas	Nurahdiah, AMd.Keb	23 Januari 2019
	2.	Kebijakan	Tentang Pelayanan Laboratorium	23 Januari 2019